

# Лесно постижима естетика: Gradia Direct от GC.

Фото-полимеризираш възстановителен композит за "невидими" възстановявания

GC GRADIA DIRECT е композит с уникална структура на частиците на пълнителя, умна и все пак проста цветова система. Наличен в Anterior и Posterior варианти, GC GRADIA DIRECT поставя нов стандарт за естетичната "невидимост" и лекота на употреба, предоставящ великолепни, естествено-изглеждащи възстановявания само с един цветови нюанс и ако е необходимо извънредно естетично обогатяване, допълнителни цветове могат да се добавят много лесно.



GRADIA DIRECT БЕ ОЦЕНЕН КАТО "ОТЛИЧЕН" С РЕЗУЛТАТ 5 ОТ МАКСИМАЛНИТЕ 5 ОТ THE DENTAL ADVISOR (БР. 21 - 2004)

## Уникална цветова система за още по-голяма простота

Невидимите възстановявания изискват правилен избор на един или няколко цветови нюанса от GC GRADIA DIRECT. За да улесни избора на правилните нюанс, интензитет, яркост и трансlucentност, предлагаме интелигентната и в същото време забележително лесна цветова система с разцветка разработена както за еднослойната, така и за многослойната техники.



**Стандартни цветове**  
При еднослойната техника, използването само на един цвят от стандартните цветове дава отличен резултат. Налични едновременно и във фронтална и в дистална версии, всеки един цвят е точно балансиран според нюанс, интензитет, яркост и трансlucentност. Фронталната версия има А, В и С цветови групи базирани на разцветката VITAPAN Classical®, както и CV (шиечен), XBW (супер избелен) и BW (избелено бяло). Дисталната версия има само цветова група А.



Пример за фронтално възстановяване



Пример за дистално възстановяване

**Специални цветове**  
Въпреки че, GC GRADIA DIRECT осигурява отлична естетика в 95% от процедурите използващи само един цвят, може да има случаи когато многоцветната техника е за предпочитане, напр. при необходимост от обширно възстановяване. Има два типа допълнителни цветове, от които можем да избираме, наречени специални цветове, които се поставят под или над стандартните цветове.

### Inside (вътрешни) специални цветове

Това са непрозрачни цветове, които се поставят под стандартните цветове, за да придадат топлина на окончателния цвят и да блокират "тъмното сияние" през устата. Има четири Inside (вътрешни) специални цвята: AO2, AO3, AO4 и X-AO2.



Пример за фронтално възстановяване

### Outside (външни) специални цветове

Поставени върху стандартните цветове, тези цветови нюанси отговарят за възрастовите промени на емайла, които засягат неговите трансlucentност и яркост. Това осигурява много по-естествен изглед.

С намаляването на дебелината на емайла от по-дебел към по-тънък, с възрастта се намалява и

стойността на цвета - неговата яркост. За децата е предназначен WT цвета (бял прозрачен) - той е най-белия, а DT цвета (тъмен прозрачен) е за по-тъмните зъби на по-възрастните. За най-възрастните е GT цвета (сив прозрачен), той дава най-черната стойност, а CVT цвета (цервикално прозрачен) е за шиечната област. Когато емайла изтънява, прозрачността на зъба се увеличава.

Това е особено забележимо в областта на режешия ръб. За по-добро наподобяване на прозрачността могат да се използват CT цвета (ясно прозрачен) и/или NT цвета (естествено прозрачен).

Всички Outside (външни) специални цветове са налични във фронталната версия, а за дисталната версия - WT и NT цветове.

### Anterior цветове Gradia Direct

Стандартни		XBW BW A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD
Вътрешни		AO2 AO3 AO4 X-AO2
Външни		DT CT GT NT WT CVT

Стандартните и вътрешните специални цветове са базирани на разцветката на Vita®.

XBW: Супер избелен  
BW: Избелено бяло  
CV: Цервикално  
CVD: Тъмно цервикално  
DT: Тъмен прозрачен  
CT: Ясно прозрачен  
GT: Сив прозрачен  
NT: Естествено прозрачен  
WT: Бял прозрачен  
CVT: Цервикално прозрачен

---

### Posterior цветове Gradia Direct

Стандартни		P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5 X-A1 X-A2 X-A3 X-A3,5
Външни		P-WT P-NT
Вътрешни		X-AO2


---

### Цветове Gradia Direct Flo & LoFlo







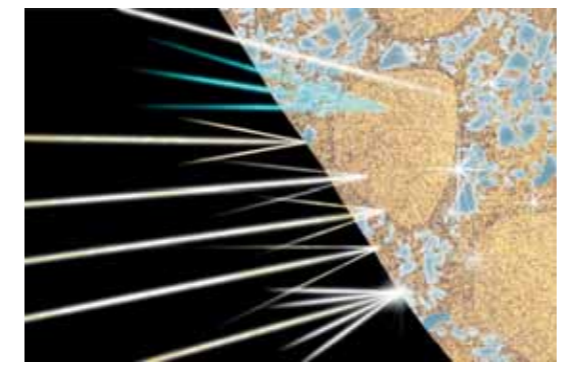

	A1 A2 A3 A3,5 BW CV AO3
--	-------------------------

### Разцветка

Повечето цветове са свързани с разцветката VITAPAN Classical®, но някои са уникални и за да подпомогнем избора предоставяме лесна за употреба разцветка. Тя има клиновидни "пръсти" с увеличаваша се дебелина за да помогне на стоматолозите да преценят влиянието на дебелината на материала за точния нюанс.



## СХЕМА ЗА ПОЛИХРОМАТИЧНО ИЗГРАЖДАНЕ

<b>КЛАС I</b> 		<b>КЛАС II</b> 	
			
<b>СТАНДАРТНИ</b>		<b>ВЪНШНИ</b>	
<b>ВЪТРЕШНИ</b>		<b>ВЪТРЕШНИ</b>	
<b>КЛАС III</b> 		<b>КЛАС IV</b> 	
			
<b>ВЪТРЕШНИ</b>		<b>СТАНДАРТНИ</b>	
<b>ВЪТРЕШНИ</b>		<b>ВЪНШНИ</b>	
			
<b>КЛАС V</b> 			
			
<b>СТАНДАРТНИ</b>		<b>ВЪНШНИ</b>	
<b>ВЪТРЕШНИ</b>		<b>ВЪТРЕШНИ</b>	

## GRADIA DIRECT



Съдържание на шприца: 2.7 ml (4 g) за anterior, 2.7 ml (4.7 g) за posterior и 2.7 ml (5 g) за X  
 Съдържание на компюла: 0.16 ml (0.24 g) за anterior, 0.16 ml (0.28 g) за posterior и 0.16 ml (0.30 g) за X



### GRADIA DIRECT Flo GRADIA DIRECT LoFlo

**ОПАКОВКИ**  
 2 по 1.5/1.3 g (0.8 ml) шприци  
 4 метални накрайника  
 2 светлосащитни капачки  
**Цветовете:** A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW  
**Принадлежности:** Накрайници за нанасяне - метални или пластмасови - 20 бр.



### G-Bond

**ОПАКОВКИ**  
**Стартов комплект:**  
 Шишенце 5 ml, 50 еднократни микроапликатора, 1 дозаторно легенче  
 Единични дози 50 x 0.1 ml, единични дози еднократни микроапликатора



### G-Light

**ОПАКОВКИ**  
 EU тип, вкл. принадлежности (светловод, батерия, зарядно устройство, предпазни конуси, предпазен щит, стойка)

## ОПАКОВКИ

**ШПРИЦИ**  
**Въвеждащ комплект:** (7 шприци), 6 Anterior цвята (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 Posterior цвят (P-A2) и 1 разцветка  
**Пълен комплект:** (26 шприци), включващ всички налични Стандартни (без V1 и XBW), Вътрешни Специални и Външни Специални цветовете и разцветка  
**Допълнително:** 1 шприца  
**КОМПЮЛИ**  
**Въвеждащ комплект:** (35 компюли), 6 Anterior цвята (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 Posterior цвят (P-A2) и 1 разцветка  
**Пълен комплект:** (106 компюли), включващ всички налични Стандартни (без V1 и XBW), Вътрешни Специални и Външни Специални цветовете и разцветка  
**Допълнително:** Кутия от 20 компюли от: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5  
**Допълнително:** Кутия от 10 компюли от: A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW, CT, WT, GT, CVT, X-AO2  
**Принадлежности :**  
 1 Разцветка  
 1 Апликатор за компюли

GC EUROPE N.V.  
 Head Office  
 Interleuvenlaan 13  
 B - 3001 Leuven  
 Tel. +32.16.39.80.50  
 Fax. +32.16.40.02.14  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
 GC EEO - България  
 ул. "Г.С. Раковски" 79А  
 BG - София 1000  
 Тел. +359.2.983.30.30  
 Факс. +359.2.858.31.37  
 Моб.: +359.888.556.338  
 bulgaria@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com



Z O LF BG 8 60 07/07

Лесно постижима  
 естетика:  
 Gradia Direct от GC.

Фото-полимеризираш възстановителен композит за "невидими" възстановявания

...сега с новите X цветовете...

